



Gåbord

Flexiwise® monteras vertikalt på den nedre halvan av den ena vertikala sidoramen (se bild). Skruva sedan fast det korta svängda röret (som medföljer), och därefter infusionsstången **D**.



Instruktioner

- 1a. Öppna båda klorna med **A** vreden.
- b. Lossa lite på båda **B** vreden.
2. Montera på valt föremål, och skruva åt alla vreden **A** och **B**.
3. Sätt fast infusionsstången **D**, vid **C** (eller **F**), och skruva åt vredet.
4. Justera **C** så att infusionsstången står vertikalt.
5. Justera med **E** infusionsstångens längd.

När Flexiwise® flyttas från ett föremål till ett annat, bör infusionsstången **D** först tas bort.

Rengöring:

Tvättas med tvål, vatten, och sprit.

Flexiwise® är framtagen för användning tillsammans med följande föremål: **rullstol, säng, rollator, gåbord, barnvagn, väggfäste, parasoll, och bildörr.**

Företaget Flexiwise® har inget ansvar om den monteras felaktigt, eller om den fastsättes på andra föremål än ovan.