




Rollator

Flexiwise® monteras horisontellt på de främre sidoramarna, ca 50 mm. nedanför sittplattan med vreden (A) inåt (se bild). Skruva sedan fast förlängningsröret (som medföljer), och därefter infusionsstången (D). Infusionsställningen skall stå vertikalt. Rollatorn med Flexiwise® skall enbart användas på plana ytor. Max 2 liter på infusionsställningen.

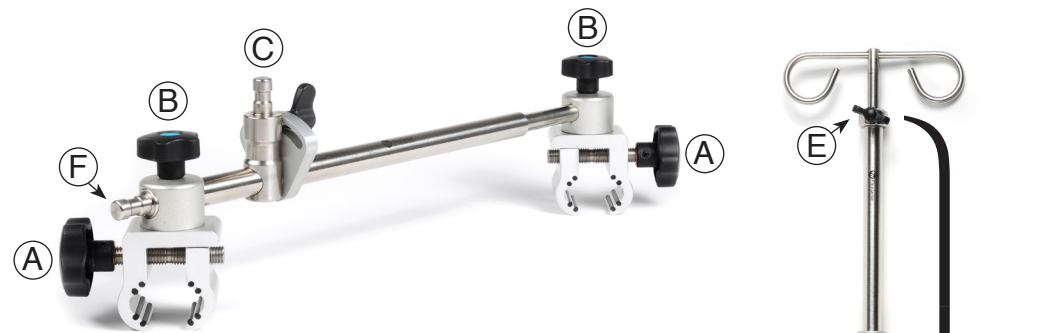

Instruktioner

- 1a. Öppna båda klorna med (A) vreden.
- b. Lossa lite på båda (B) vreden.
2. Montera på valt föremål, och skruva åt alla vreden (A) och (B).
3. Sätt fast infusionsstången (D), vid (C) (eller (F)), och skruva åt vredet.
4. Justera (C) så att infusionsstången står vertikalt.
5. Justera med (E) infusionsstångens längd.

När Flexiwise® flyttas från ett föremål till ett annat, bör infusionsstången (D) först tas bort.

Rengöring:

Tvättas med tvål, vatten, och sprit.

Flexiwise® är framtagen för användning tillsammans med följande föremål: **rullstol, säng, rollator, gåbord, barnvagn, väggfäste, parasoll, och bildörr.**

Företaget Flexiwise® har inget ansvar om den monteras felaktigt, eller om den fastsättes på andra föremål än ovan.