




Rullstol

Flexiwise® monteras horisontellt över rullstolshandtag/handtagen. Kontrollera att Flexiwise® inte påverkar rullstolens ordinarie funktioner t.ex. broms, nackstöd, eller annan utrustning. När ryggstödet lutas bakåt, är det viktigt att infusionsstången D justeras så att den är vertikal.

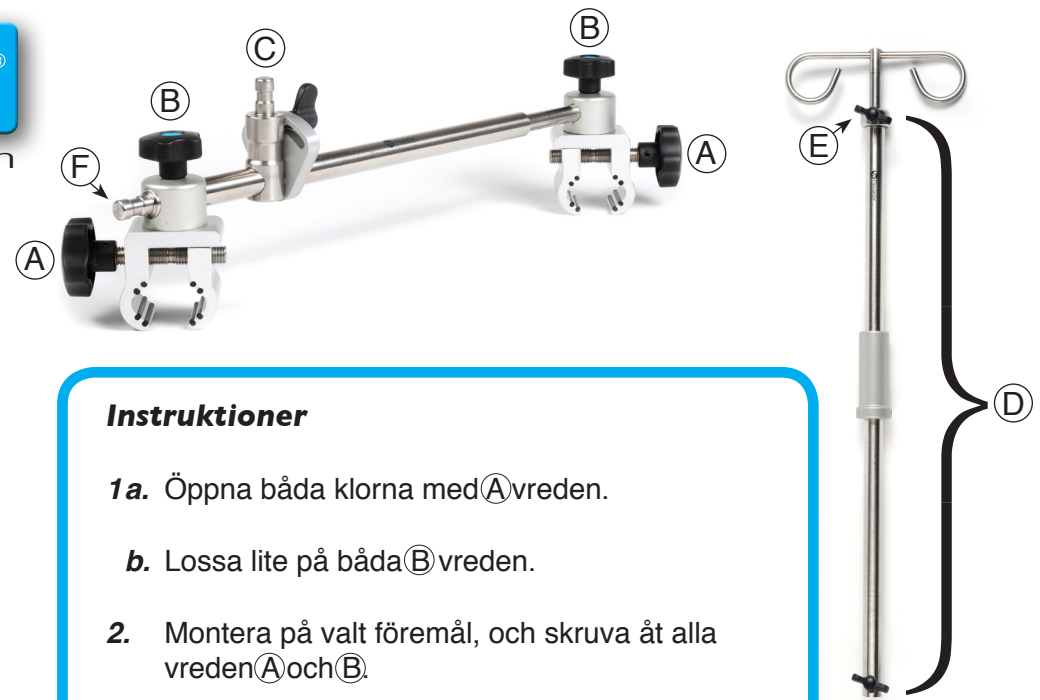

Instruktioner

- 1a. Öppna båda klorna med Ⓐ vreden.
- b. Lossa lite på båda Ⓑ vreden.
2. Montera på valt föremål, och skruva åt alla vreden Ⓐ och Ⓑ.
3. Sätt fast infusionsstången Ⓓ, vid Ⓒ (eller Ⓕ), och skruva åt vredet.
4. Justera Ⓒ så att infusionsstången står vertikalt.
5. Justera med Ⓔ infusionsstångens längd.

När Flexiwise® flyttas från ett föremål till ett annat, bör infusionsstången Ⓓ först tas bort.

Rengöring:

Tvättas med tvål, vatten, och sprit.

Flexiwise® är framtagen för användning tillsammans med följande föremål: **rullstol, säng, rollator, gåbord, barnvagn, väggfäste, parasoll, och bildörr.**

Företaget Flexiwise® har inget ansvar om den monteras felaktigt, eller om den fastsättes på andra föremål än ovan.